

Utilize o aplicativo **QuoreOne Patient** para marcar seus eventos e sintomas de maneira rápida, prática e eficiente.



Aponte a câmera do seu celular para o código ao lado e faça o download do diário do paciente:



Após download do aplicativo coloque o número do seu CPF ou código fornecido pelo estabelecimento de saúde.

No diário, anote sintomas e eventos com os horários que acordou e dormiu, horários das refeições, atividades físicas e medicamentos que tomou, de forma rápida, prática e mais eficiente.

Guia Rápido Para Pacientes



Exame Offline



A Quoretech desenvolveu uma solução integrada para a detecção de arritmia cardíaca e este guia tem como objetivo, auxiliar o paciente sobre as funções básicas do dispositivo durante o tempo em que estiver realizando o exame.



Conheça melhor como funciona o QuoreOne


Passo 1 Marcar um evento

Em caso de sintomas clínicos (ex.: dor, palpitações, falta de ar, tontura) ou eventos (ex.: atividade física, ingestão de medicamento), registre-os no aplicativo QuoreOne Patient clicando em **ADICIONAR NOTA**. Essas informações podem auxiliar na análise do exame.

Os sintomas ou eventos também podem ser marcados pressionando o botão central multifunção por 2 segundos, o que fará com que uma luz led **VERDE** acenda, indicando que a marcação foi registrada.

Não há risco de desligar o dispositivo, pois ele está programado para desligar automaticamente ao final do tempo de exame programado pelo médico.

Durante a realização do exame o dispositivo não emite nenhum sinal sonoro ou luminoso quando em bom funcionamento.

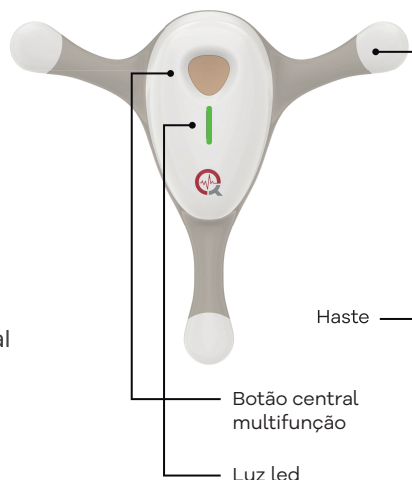

IMPORTANTE: Pressionar a tecla Multifunção não significa solicitar ajuda ou socorro. Se necessário solicite ajuda a qualquer pessoa próxima ou ligue para o serviço de emergência.

Passo 2 Indicador Luminoso - Led



Relembrando, quando um sintoma ou **evento for marcado**, a luz led acenderá **VERDE**, indicando o registro da marcação realizada.



O dispositivo QuoreOne é fixado por 4 eletrodos, que são os adesivos colados ao seu tórax.


Caso um deles se desconecte do seu corpo ou do dispositivo, a luz led piscará **AZUL**, indicando a necessidade de ajuste. Vá para o **PASSO 3** deste manual para saber como proceder.

Ficou com alguma dúvida?


Veja o vídeo detalhando o procedimento escaneando o QRcode ao lado




Passo 3 Substituir eletrodos

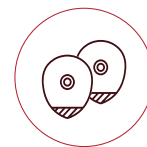

1. Eletrodo é o adesivo que está colado no seu tórax, onde o dispositivo **QuoreOne** está conectado. Você tem **4 pontos de conexão** instalados.

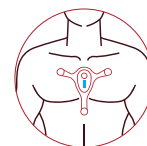


2. Se por qualquer motivo algum eletrodo descolar do ponto de conexão no dispositivo **QuoreOne**, uma luz de **LED AZUL** acenderá na parte da frente do aparelho

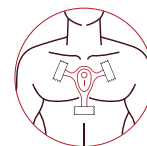

3. Identifique o eletrodo que está desconectado, retire a fita microporosa sobre o ponto (se houver) e, **cuidadosamente, segure a haste e puxe o adesivo para retirá-lo do ponto de conexão**. Fique na frente de um espelho para auxiliar neste processo ou peça a ajuda de alguém de confiança.




4. Limpe a pele removendo qualquer sinal de umidade (suor, água) ou oleosidade.

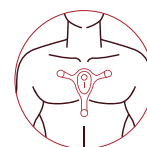

5. Em seguida, **fixe o novo eletrodo conectando-o primeiro nas pontas da haste do dispositivo QuoreOne**, sem remover a película protetora.

Se for necessário substituir todos os eletrodos, iniciar pelo eletrodo do ponto de conexão central.

Após conectar o eletrodo, remova a película e então pressione-o firmemente contra a pele do tórax, massageando toda a sua superfície para que ele fique bem fixado. Se quiser pode colocar uma fita microporosa adesiva sobre a haste do eletrodo que foi trocado, para melhorar a fixação.

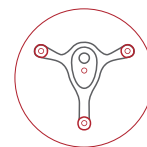

6. Para manter a instalação do dispositivo estável, é recomendado:

- Não dormir de **bruços**;
- Não utilizar **colares ou acessórios** sobre o dispositivo;
- Não **friccionar** a pele no local da instalação do dispositivo;
- **Tomar banho com cautela** para não molhar o eletrodo adesivo.