


Passo 4

Substituir eletrodos



1. Eletrodo é o adesivo que está colado no seu tórax, onde o dispositivo **QuoreOne** está conectado. Você tem **4 pontos de conexão** instalados.

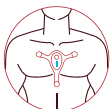


2. Se por qualquer motivo algum eletrodo descolar do ponto de conexão no dispositivo **QuoreOne**, uma luz de **LED AZUL** acenderá na parte da frente do aparelho.



3. Identifique o eletrodo que está desconectado, retire a fita microporosa sobre o ponto (se houver) e, **cuidadosamente, segure a haste e puxe o adesivo para retirá-lo do ponto de conexão**. Fique na frente de um espelho para auxiliar neste processo ou peça a ajuda de alguém de confiança.



4. Limpe a pele removendo qualquer sinal de umidade (suor, água) ou oleosidade.

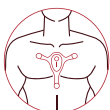

5. Em seguida, **fixe o novo eletrodo conectando-o primeiro nas pontas da haste do dispositivo QuoreOne**, sem remover a película protetora.

Se for necessário substituir todos os eletrodos, iniciar pelo eletrodo do ponto de conexão central.

Após conectar o eletrodo, remova a película e então pressione-o firmemente contra a pele do tórax, massageando toda a sua superfície para que ele fique bem fixado. Se quiser pode colocar uma fita microporosa adesiva sobre a haste do eletrodo que foi trocado, para melhorar a fixação.



6. Para manter a instalação do dispositivo estável, é recomendado:

- Não dormir de **bruços**;
- Não utilizar **colares ou acessórios** sobre o dispositivo;
- Não **friccionar** a pele no local da instalação do dispositivo;
- **Tomar banho com cautela** para não molhar o eletrodo adesivo.

Guia Rápido Para Pacientes



Exame Online




A Quoretech desenvolveu uma solução integrada para a detecção de arritmia cardíaca e este guia tem como objetivo, auxiliar o paciente sobre as funções básicas do dispositivo durante o tempo em que estiver realizando o exame.



DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Utilize o aplicativo **QuoreOne Patient** para marcar seus eventos e sintomas de maneira rápida, prática e eficiente.

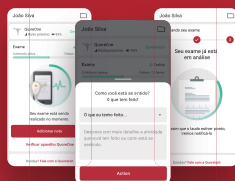

Ficou com alguma dúvida?

Veja o vídeo detalhando o procedimento escaneando o QRcode ao lado



www.quore.tech


[/quoretech](https://www.instagram.com/quoretech)

[/QuoreOne](https://www.facebook.com/QuoreOne)

[/company/quoretech](https://www.linkedin.com/company/quoretech)

QT-GRON03


Passo 1 Iniciar o exame

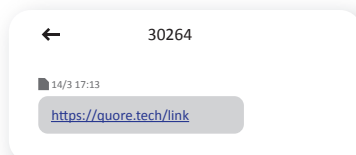


1. Durante a instalação do dispositivo **QuoreOne**, você receberá uma mensagem **SMS com um link** para abrir o **App QuoreOne Patient** automaticamente, depois basta seguir os próximos passos.



2. Para acessar o aplicativo, apenas digite o seu **CPF ou o código fornecido pelo estabelecimento** onde fez a instalação do exame e clique em **Login**.

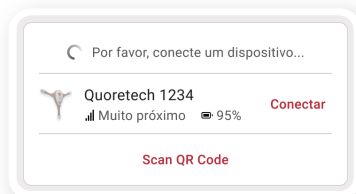

3. Após o Login, clique no botão **Conectar** para que o Aplicativo se conecte com o dispositivo **QuoreOne** instalado em seu tórax.

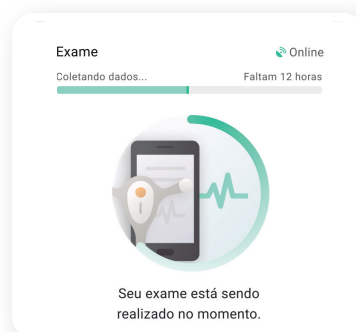


4. Para certificar que os sinais de seu coração estão sendo transmitidos do dispositivo **QuoreOne** para o **Aplicativo**, a tela ao lado aparecerá.




IMPORTANTE: Durante o exame, mantenha o Bluetooth ativado e a data/hora no automático em seu telefone celular. Se houver uma desconexão da internet, os dados do eletrocardiograma serão armazenados no dispositivo QuoreOne e transmitidos automaticamente quando o celular se reconectar.

Passo 2 Transmissão do exame

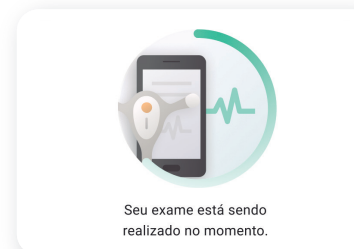


1. Observe com frequência a tela ao lado ao longo do exame para verificar se há alguma **mensagem de alerta de desconexão com a rede de Internet ou dos eletrodos**, que são os adesivos colados no seu tórax e que se conectam ao dispositivo QuoreOne.

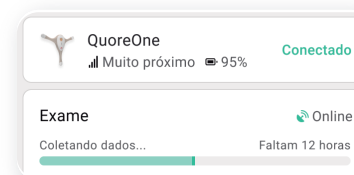

2. Procure manter sempre que possível, o seu aparelho celular conectado a uma rede wi-fi ou 4G, identificando a conexão com o sinal **ONLINE** no aplicativo.

3. Se o celular estiver desconectado, a barra de progresso indicará a cor **VERMELHA**. Vá então para as suas configurações do aparelho celular e reconecte à rede wi-fi para continuar a transmitir os dados do exame.

Passo 3 Marcar um evento

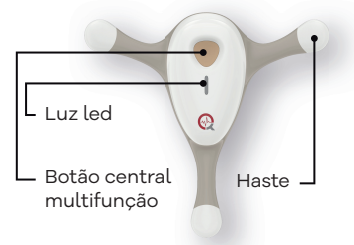


Em caso de sintomas clínicos (ex.: dor, palpitações, falta de ar, tontura) ou eventos (ex.: atividade física, ingestão de medicamento), registre-os no aplicativo QuoreOne Patient clicando em **ADICIONAR NOTA**. Essas informações podem auxiliar na análise do exame.

Os sintomas ou eventos também podem ser marcados pressionando o botão central multifunção por 2 segundos, o que fará com que uma luz led **VERDE** acende indicando que a marcação foi registrada.

Não há risco de desligar o dispositivo, pois ele está programado para desligar automaticamente ao final do tempo de exame programado pelo médico.

Durante a realização do exame o dispositivo não emite nenhum sinal sonoro ou luminoso quando em bom funcionamento.

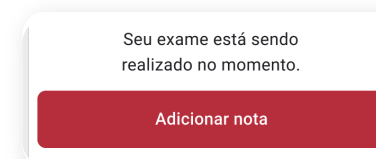

IMPORTANTE: Pressionar a tecla Multifunção não significa solicitar ajuda ou socorro. Se necessário solicite ajuda a qualquer pessoa próxima ou ligue para o serviço de emergência.