


4. Marcar um evento

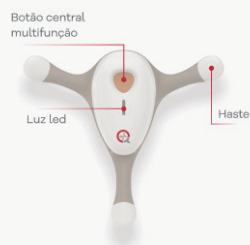

Se tiver algum sintoma, como dor, falta de ar ou tontura, ou fizer alguma atividade, como exercícios ou tomar remédio, registre no aplicativo QuoreOne clicando no botão "+" para **ADICIONAR NOTA**. Essas informações ajudam na análise do exame.

Para marcar sintomas ou eventos, pressione o botão central por 2 segundos. A luz **VERDE** acenderá para confirmar o registro.

Não há risco de o dispositivo desligar sozinho; ele foi programado para funcionar até o final do exame, conforme definido pelo médico.


Durante o exame, o dispositivo não emite som ou luz, indicando que está funcionando corretamente.



IMPORTANTE: Pressionar a tecla Multifunção não significa solicitar ajuda ou socorro. Se necessário solicite ajuda a qualquer pessoa próxima ou ligue para o serviço de emergência.

Possui Marcapasso? Veja Como Enviar o Documento

Este passo deve ser seguido apenas por pacientes que **não adicionaram essa informação** no momento da instalação com o médico.

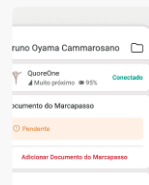


PASSO 1

Selecione "Adicionar Documento do Marcapasso" e faça o upload da sua carteirinha



PASSO 2

Coloque o documento do marcapasso em uma superfície plana e bem iluminada.

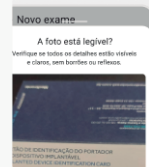

PASSO 3

Tire uma foto clara da frente e do verso do documento, confirmando se está legível.



PASSO 4

Verifique as informações e clique em "Salvar".



Disponível na
App Store

BAIXAR NO
Google Play

Utilize o **aplicativo QuoreOne Patient** para marcar seus eventos e sintomas de maneira rápida, prática e eficiente.

Ficou com dúvidas sobre instalação?

Veja o vídeo detalhando o procedimento escaneando o QRcode ao lado.



Exame Online

A Quoretech desenvolveu uma solução integrada para a detecção de arritmia cardíaca e este guia tem como objetivo, auxiliar o paciente sobre as funções básicas do dispositivo durante o tempo em que estiver realizando o exame.



1. Iniciar o Exame




PASSO 1

O aplicativo é uma forma de você colaborar com seu exame, permitindo a transmissão dos dados em tempo real. Para acessar o app basta escanear o **QRCode** ao lado com a câmera do seu celular e seguir as próximas etapas.




PASSO 2

Para acessar o aplicativo, apenas digite o seu **CPF** ou o **código fornecido pelo estabelecimento** onde fez a instalação do exame e clique em **Login**.

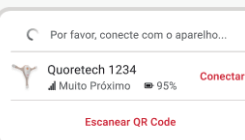

PASSO 3

Após o Login, clique no botão **Conectar** para que o Aplicativo se conecte com o dispositivo **QuoreOne** instalado em seu **tórax**.

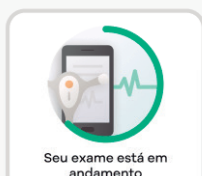


PASSO 4

Para certificar que os sinais de seu coração estão sendo transmitidos do dispositivo **QuoreOne** para o **Aplicativo**, a tela ao lado aparecerá.




IMPORTANTE: Durante o exame, mantenha o Bluetooth ativado e a data/hora no automático em seu telefone celular. Se houver uma desconexão da internet, os dados do eletrocardiograma serão armazenados no dispositivo QuoreOne e transmitidos automaticamente quando o celular se reconectar.

2. Transmissão do exame

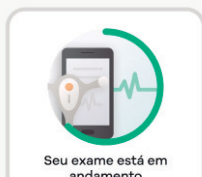

PASSO 1

Durante o exame, verifique frequentemente a tela ao lado para **avisos de desconexão da internet ou dos eletrodos**, que são os adesivos colados no seu tórax e que se conectam ao dispositivo.

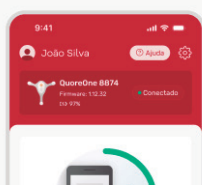

PASSO 2

Mantenha o celular sempre conectado ao Wi-Fi ou 4G. Verifique se aparece **ONLINE** no aplicativo.

PASSO 3

Se o celular desconectar, a barra ficará **VERMELHA**. Vá nas configurações e reconecte ao Wi-Fi.

3. Substituir eletrodos



1. O eletrodo é o adesivo colado no seu tórax, onde o dispositivo **QuoreOne** está conectado. **Você possui 4 pontos de conexão.**



2. Se por qualquer motivo algum eletrodo descolar do ponto de conexão no dispositivo **QuoreOne**, uma luz de **LED AZUL** acenderá na parte da frente do aparelho.



3. **Identifique o eletrodo solto, retire a fita adesiva (se houver) e, com cuidado, segure a haste e puxe o adesivo para removê-lo.** Use um espelho ou peça ajuda, se necessário.



4. **Limpe a pele** removendo qualquer sinal de umidade (suor, água) ou oleosidade.



5. Em seguida, **fixe o novo eletrodo conectando-o primeiro nas pontas da haste do dispositivo QuoreOne**, sem remover a película protetora. Quando a troca for total, o eletrodo central deve ser aplicado/fixado diretamente na pele.

Após conectar o eletrodo, remova a película e então pressione-o firmemente contra a pele do tórax, massageando toda a sua superfície para que ele fique bem fixado. Se quiser, pode colocar uma fita microporosa adesiva sobre a haste do eletrodo que foi trocado, para melhorar a fixação.



6. Para manter a instalação do dispositivo estável, é recomendado:
 - Não dormir de **bruços**;
 - Não utilizar **colares ou acessórios** sobre o dispositivo;
 - Não **friccionar** a pele no local da instalação do dispositivo;
 - **Tomar banho com cautela** para não molhar o eletrodo adesivo.