



Descubra como o app **QuoreOne Patient** torna seu exame mais fácil e preciso!

Você sabia que o aplicativo **QuoreOne Patient** é um aliado essencial para o sucesso do seu exame de Holter?



O aplicativo **QuoreOne Patient** foi pensado para tornar seu exame de monitorização cardíaca mais confortável e ágil, pois é simples de usar, permite transmissão dos sinais eletrocardiográficos do seu coração em tempo real, e registro de informações importantes sem depender de papéis.

Como você se beneficia com o uso do aplicativo?



Praticidade

Com o aplicativo, mesmo para quem não está acostumado com tecnologia, consegue anotar de forma fácil os medicamentos que toma, atividades que realiza e sintomas que vivencia ao longo do exame, informações importantes para avaliação pelo seu médico.



Rapidez

Através do bluetooth do seu celular os sinais eletrocardiográficos do seu coração são transmitidos em tempo real para a plataforma, agilizando assim a análise final do seu exame.



Precisão

As anotações que você fizer serão conectadas automaticamente, ao seu exame, evitando os erros de transcrição quando anotados em papel.



Utilize o aplicativo **QuoreOne Patient** para marcar seus eventos e sintomas de maneira rápida, prática e eficiente. Avalie a sua experiência com **QuoreOne Patient** na loja de aplicativos

Ficou com dúvidas sobre instalação?

Veja o vídeo detalhando o procedimento: escaneando o QRcode ao lado.




Como começar utilizar o aplicativo?



PASSO 1

Selecione o ícone "Ajustes/Definições" na tela do seu celular.

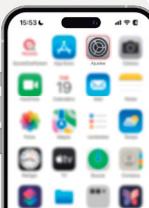

PASSO 2

Na área "Geral" seccione "Data e Hora" e acione para "Automático", caso não esteja acionado.



PASSO 3

Volte para o ícone de "Ajustes/Definições" e encontre a área "Bluetooth" e verifique se está ativado. Mantenha-o ativado por todo o período do exame.



PASSO 4

Na tela do seu celular selecione o ícone "Câmera" e aponte-a para um dos QRCode para baixar o aplicativo.



PASSO 5

Para acessar o aplicativo, apenas digite o seu CPF ou o código fornecido pelo estabelecimento onde fez a instalação do exame e clique em "Entrar".




PASSO 6

Após entrar, clique no botão "conectar" para que o aplicativo se conecte com o dispositivo QuoreOne instalado no seu tórax. Para certificar que os sinais de seu coração estão sendo transmitidos do dispositivo QuoreCne para o aplicativo Patient, a tela ao lado aparecerá, indicando "conectado".



PASSO 7

Selecionando o botão no canto inferior direito "+" você pode descrever qualquer evento que aconteça durante o seu exame, como medicamentos, atividades e sintomas.

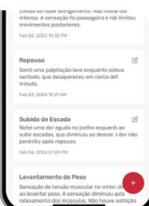

PASSO 8

Para criar uma anotação basta selecionar o tipo de evento que quer informar, adicionar mais detalhes no campo indicado e na sequência selecionar o botão "Enviar nota". Ao final surgirá a mensagem "Sua nota foi criada com sucesso!", confirmando o seu registro.



Precisa de ajuda? Não se preocupe! Nossa equipe estará ao seu lado para garantir que tudo funcione direitinho.

✉ Suporte@quore.tech

☎ (11) 3351 7250

Seu coração merece o melhor cuidado. E com o QuoreOne Patient, você está no controle!

Improved and affordable cardiovascular care everywhere